



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara
Tel. 0522654218
* reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFHUB3

Novellara, 06.10.2021

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Aderenti al progetto "Scuole Sentinella"

e, p.c. AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

I.C. NOVELLARA

Ogg.: Scuole sentinella - Organizzazione prelievo e restituzione kit.

Gentili Genitori/Tutori,

domani 7 ottobre dovrà essere effettuato e consegnato il primo test salivare della campagna "Scuole Sentinella". Al fine di condividere la modalità più corretta e funzionale di prelievo e restituzione dei kit forniti dal Dipartimento di Salute Pubblica, Vi raccomandiamo di attenerVi alla seguente procedura:


1) **Prelievo del kit** - la scuola consegnerà agli alunni il kit **il giorno prima del test**; il kit è composto da:



2) **Esecuzione del test - Istruzione per auto-prelievo di campioni di saliva con dispositivo LoliSponge:**

- Eseguire la raccolta di saliva la mattina della consegna del campione salivare, preferibilmente al risveglio; se si procede dopo la colazione e/o il lavaggio dei denti, attendere almeno 30 minuti prima di raccogliere la saliva

- Lavare o igienizzare le mani prima di utilizzare il dispositivo. (Non usare se il dispositivo è visibilmente danneggiato)
- Aprire la busta della singola unità ed estrarre la provetta Lollisponge.
- Aprire la provetta Lollisponge come in **figura 1** facendo in modo che la spugna non tocchi superfici o altre parti del corpo diverse dalla bocca.
- Tenendo il dispositivo dal tappo, inserirlo all'interno della bocca (**figura 2**). Muoverlo delicatamente all'interno della bocca (parte superiore della lingua e fra denti e guancia) per un minimo di 60 secondi in modo da inumidire bene le spugne.
 - *Durante il prelievo non forzare o premere eccessivamente Lollisponge; in caso contrario, il bastoncino potrebbe rompersi accidentalmente o staccarsi dal tappo.*
 - *Non inserire saliva direttamente nella provetta.*
 - *Non mordere la spugna.*
 - *Non staccare il bastoncino con la spugna dal tappo.*

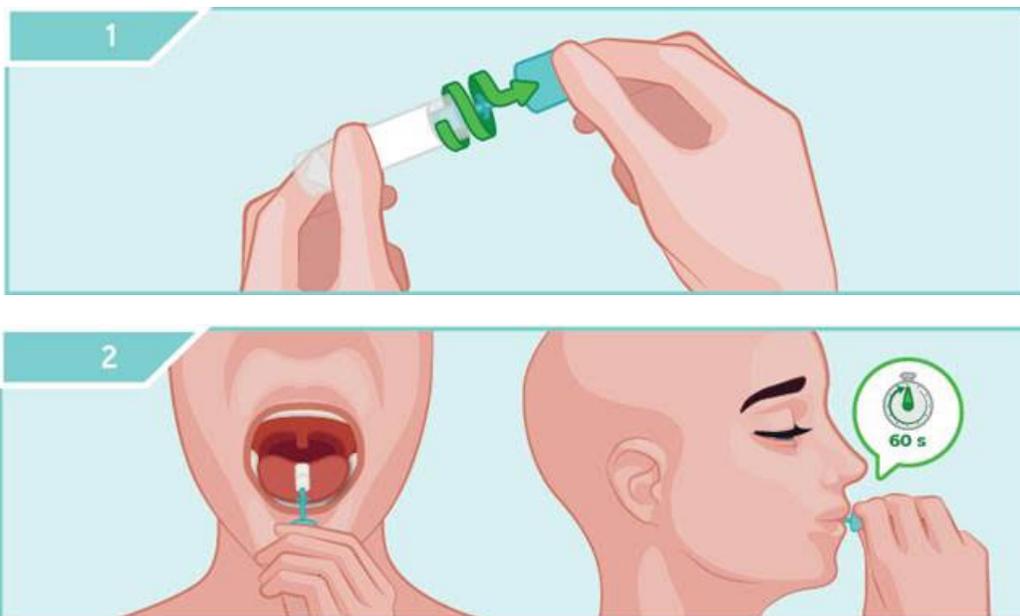

- ➔ Posizionare il tappo sulla provetta Lollisponge ed avvitarlo. Chiudere saldamente la provetta Lollisponge (**figura 3**).



→ Posizionare l'etichetta adesiva col codice a barre sulla provetta (**Figura 4**).



figura 4

→ Inserire la provetta nella busta trasparente piccola "minigrip" fornito (contenitore secondario (**figura 5**)).



figura 5

→ Conservare il campione a temperatura ambiente fino al momento della consegna a scuola. Nel caso in cui il prelievo dovesse essere per qualche motivo eseguito prima di 12 ore dalla consegna si raccomanda di mantenerlo refrigerato a 2°- 8° C.

4) Restituzione del kit – all'ingresso a scuola gli alunni depositeranno personalmente il kit, nell'apposito contenitore messo a disposizione dal D.S.P. nell'atrio della scuola, pertanto **vi raccomandiamo di verificare che:**

→ il tamponcino "lollipop" sia stato chiuso correttamente nel proprio apposito contenitore;

→ il contenitore sia stato ben sigillato nell'apposita bustina, ricevuta in dotazione.

Se per qualsiasi motivo non fosse possibile utilizzare la bustina sigillante fornita dal DSP, non sarà possibile depositare il test.

Vi ringrazio ancora per la preziosa disponibilità e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia VALENTINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993